

XX100-** 転写紙 製作取扱説明書

1. オープンの温度を170°C~180°Cに設定します。
もしくは使用する材料の軟化温度に設定してください。
2. 材料が軟化し、表面が透明になったら模様を転写したい位置に、転写紙の転写面を張り付けてください。
3. その後転写紙が材料によく馴染むように、表面を撫でてください。
4. 全体的になじませたら、再度オープンを閉じてください。
5. 30秒~1分程度時間をおいてから、オープンを開けてください。
6. 模様が付いていることを確認しながら、転写紙をはがしてください

※材料によって転写紙が剥がしにくい場合、転写紙を張り付ける前にシリコンスプレーを材料表面に軽く塗布してください。

※製品で使用される前に、事前に試験片などでお試してください。

